

# *Mottak av urene instrumenter på sterilsentralen*

*May-Liss Ingebrigtsen, Avdelingsleder  
Sterilforsyning og spesialrenholds avdelingen Tromsø og Harstad*



- 2015 startet en langsiktig plan for utskifting av Teknisk utstyr UNN HF
- I den forbindelse ble det gjennomført flere utredninger, deriblant organiseringen av sterilforsyningen
- Sterilforsyningstjenesten var da lokalisert på forskjellige steder
- Instrumentene ble vasket nært driftsarealene for kirurgi og poliklinisk virksomhet



# Innen utgangen av 2015 ble det besluttet følgende:

- Samle sterilforsyning innenfor ett areal
- En større ombyggingsprosess startet



Frem til februar 2017 ble instrumentrengjøring gjennomført på operasjonsavdelingen





# Mottak av urene instrumenter

- Verneutstyr som beskyttelsesfrakk (eventuelt plastforkle i tillegg), hansker, og munnbind m/visir benyttes
- Vogn med urent utstyr skannes for mottak
- Dekke arbeidsbord



- Alt utstyr som kan rengjøres i instrumentvaskemaskin skal rengjøres maskinelt
- En del instrumenter krever manuell forbehandling med børsting eller ultralydbehandling
- Hvis det er ventetid før rengjøringsprosessen starter, sprayes instrumentene med et forbehandlingsskum som forhindrer inntørking og korrosjon på instrumentet




# Lasting i instrumentvaskemaskiner

- Godkjente vaskerister benyttes
- Instrumentene lastes forsiktig i vaskeristene slik at instrumentene ikke utsettes for mekanisk skade
- Lastes slik at rengjøring og desinfeksjonsvæsken når alle flater







- Leddede og bevegelige instrumenter skal vaskes i delvis åpen stilling for et godt rengjøringsresultat, og for å unngå ugunstig spenning i instrumentet
- Ømfintlig utstyr, mikroinstrumenter og små deler sikres slik at de ikke skades i den mekaniske prosessen

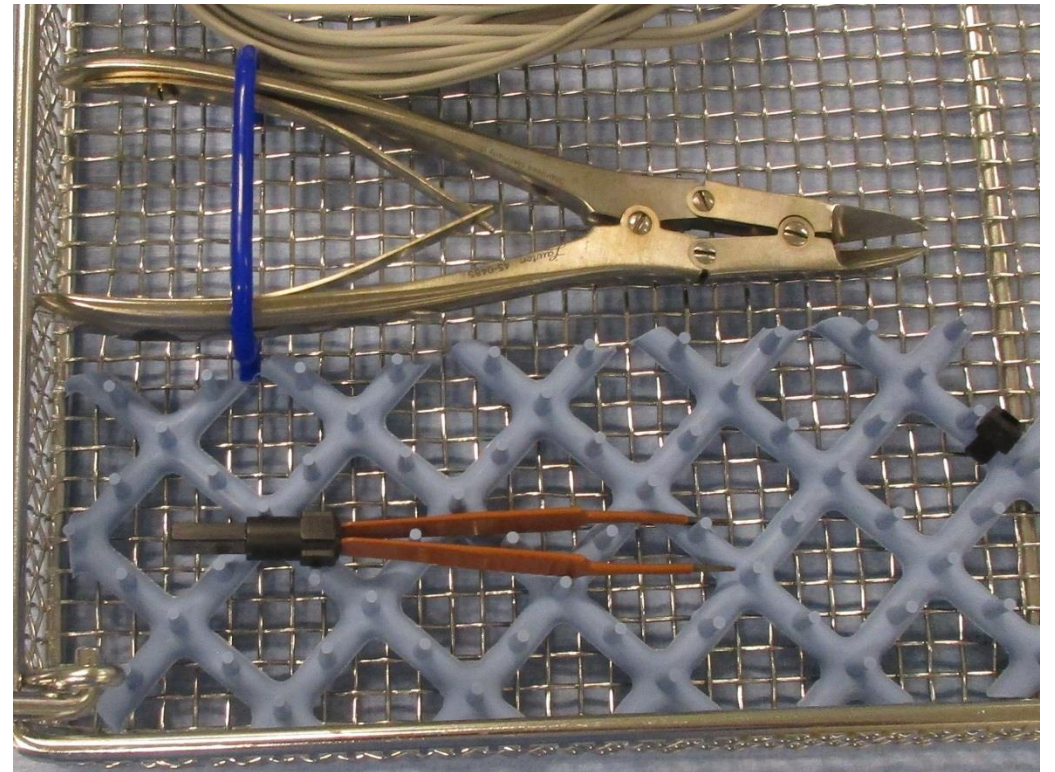


- Instrumenter demonteres før rengjøring
- Større utstyr som boller etc. må ikke skygge for annet utstyr
- Ledninger og kabler legges slik at det ikke surrer seg fast i vaskearm

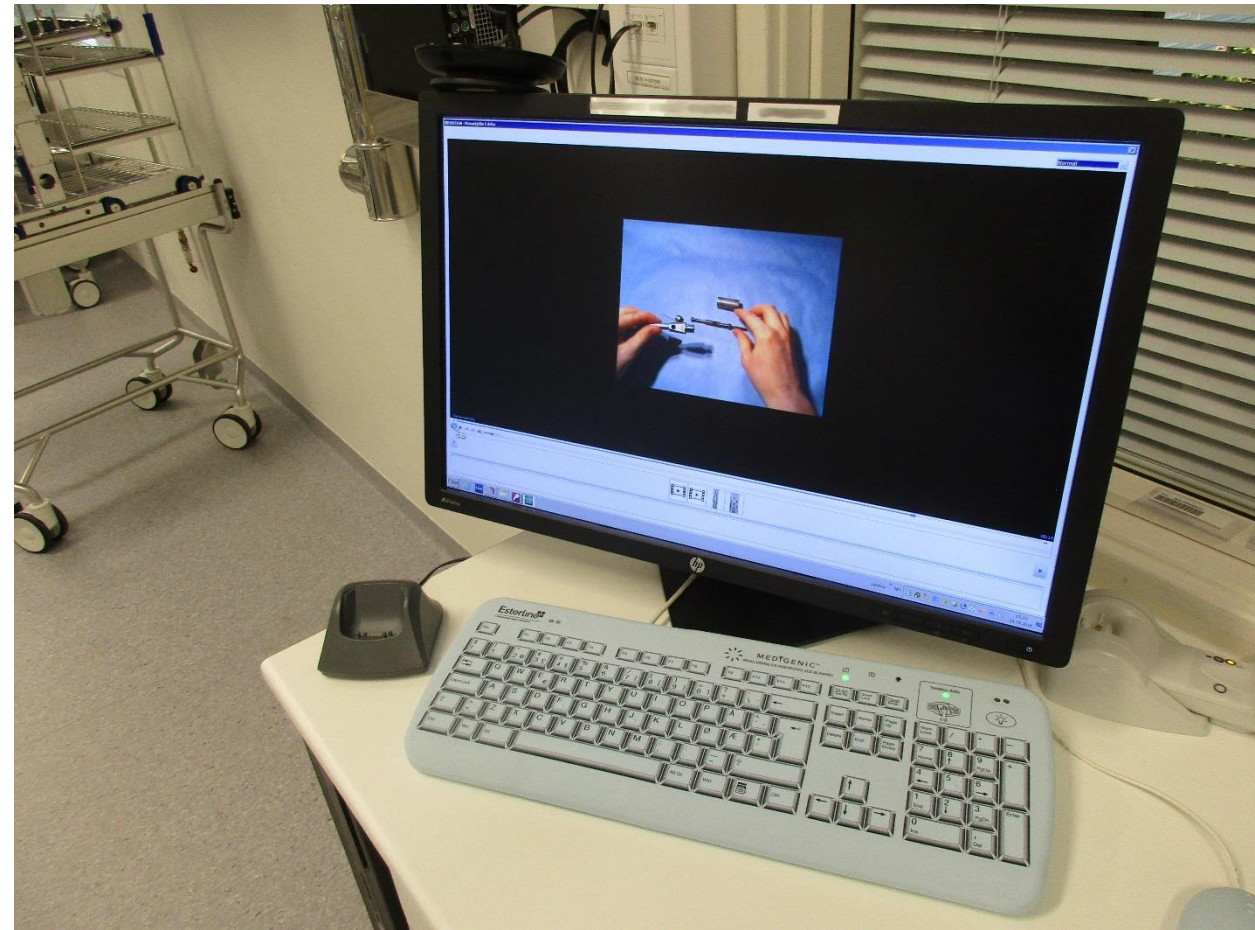

Alle instrumenter med lumen settes på innsasts for gjennomspyling.

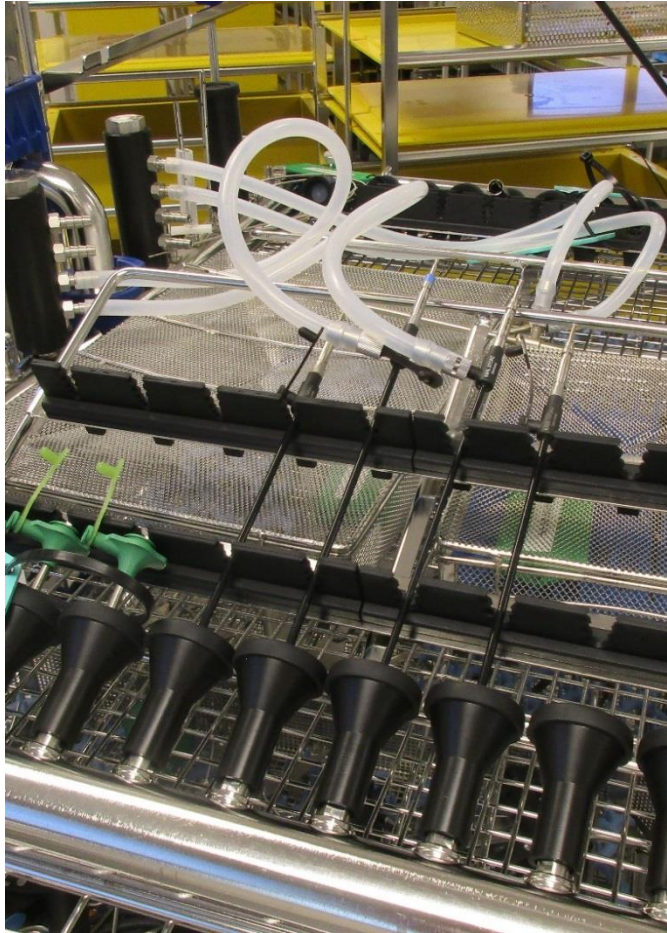

Ved rengjøring av hule instrumenter settes det mikrofilter på vannuttaket i maskinen.

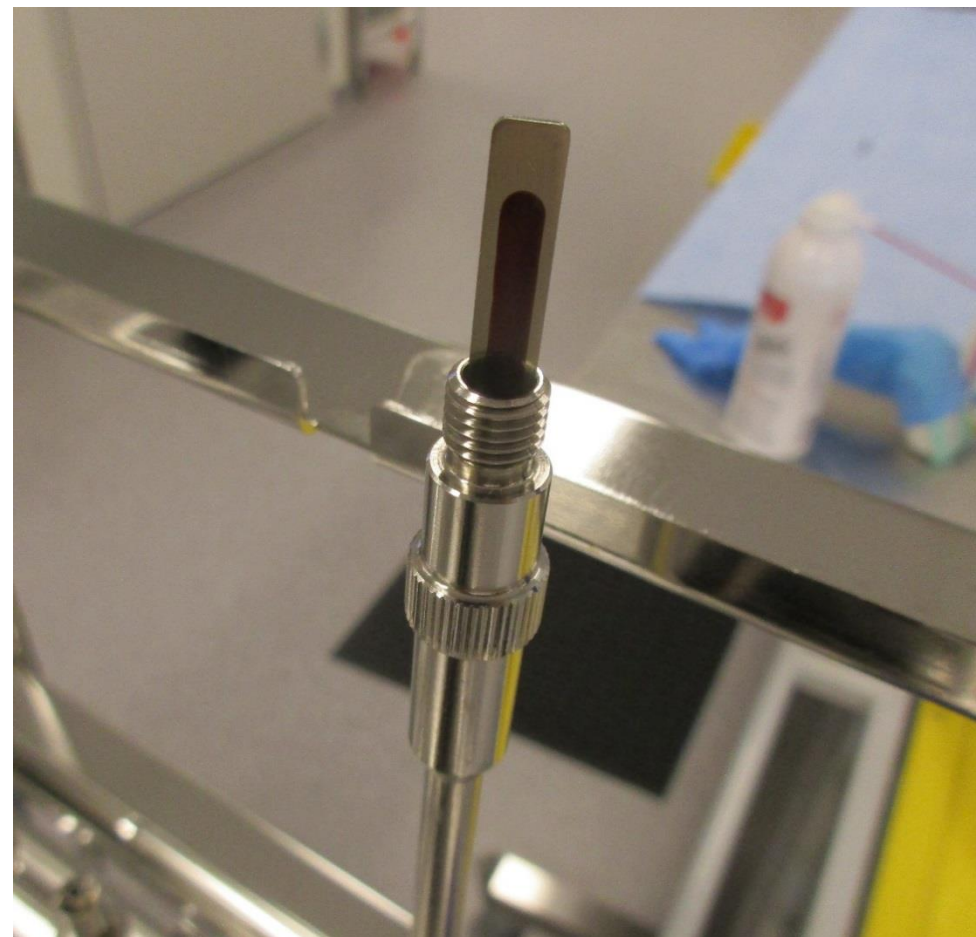

# Reamere



# Da Vinci tenger



- Brukte bakker, lokk og vogner rengjøres og desinfiseres i kabinettvaskemaskinen
- Når instrumentene er ferdig lastet, rengjøres og desinfiseres arbeidsbordet og kontaktflatene. Hvilket desinfeksjonsmiddel som benyttes er avhengig av om det var kjent smitte.

